

medimex PE-Schürzen premium

Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt / Bedienungsanleitung

REF	8M50121215
Farbe:	Weiß
Material:	Polyethylen (LDPE), 35 µ (± 5 %)
Größe (Breite x Länge):	80 x 140 cm (± 2 cm)
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Gehämmert • Zum Einmalgebrauch
Hinweis:	Nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet.

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I

Anwendungsbereich: PE-Schürzen werden vor allem für Reinigungsarbeiten benutzt. Auch für die Bereiche Lebensmittel-Industrie, Pharma, Medizin oder Kosmetik werden solche PE-Schürzen verwendet.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:

1. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die PE-Schürzen auf eventuelle Mängel oder Fehler, wie Löcher und Risse. Beschädigte PE-Schürzen nicht verwenden.
2. PE-Schürzen, die während des Gebrauchs reißen oder durchstochen werden, sind umgehend zu entsorgen. Verwenden Sie im Zweifelsfall eine neue Schürze.
3. Wenden Sie die Innenseite der Schürze nicht nach außen.
4. Schürzen von offenen Flammen fernhalten.

Bestandteile/Gefährliche Bestandteile: Warnhinweis: Die verwendeten Materialien sind nicht dafür bekannt allergische Reaktionen, sonstige Irritationen oder gesundheitliche Probleme hervorzurufen.

Pflegeanleitung:

Lagerung: Vor direktem Sonnenlicht schützen, kühl und trocken lagern. Werden die PE-Schürzen gemäß den obigen Anleitungen ordnungsgemäß gelagert, werden ihre Leistungsfähigkeit und Eigenschaften nicht wesentlich gemindert. PE-Schürzen, deren Leistung oder Eigenschaften durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden können, sind auf den Verpackungsmaterialien mit einem Haltbarkeitsdatum versehen.

Reinigung: PE-Schürzen können weder gewaschen noch wiederverwendet werden.
(Einmalgebrauch)


Sterilität: Die Produkte sind unsteril!

Entsorgung: Gebrauchte Schürzen können mit infektiösen oder anderen gefährlichen Stoffen verschmutzt sein. Entsorgen Sie diese gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. Entsorgung in Deponien oder Müllverbrennungsanlagen nur unter kontrollierten Bedingungen.

medimex PE-Schürzen premium

Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt / Bedienungsanleitung

Verpackungseinheit: VE = 60 Stück
UK = 600 Stück im Karton (Inhalt 10 VE)

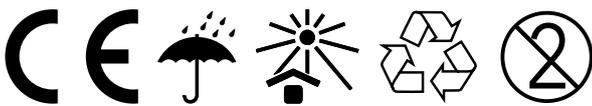

medimex GmbH

In den Fritzenstücker 9-11
D-65549 Limburg
fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235
www.medimex.de