

medimex PE-Kittel classic

Technisches Datenblatt / Produktdatenblatt / Bedienungsanleitung



REF	8M50120155
Farbe:	Blau
Material:	Polyethylen (PE) 0,03 mm ($\pm 5\%$)
Maße: (Breite x Länge)	109 x 114 cm (± 2 cm)
Beschreibung:	• Einmalkittel zum Binden • Mit Daumenschlaufen • Latexfrei
Hinweise:	Nicht für den Umgang mit Gefahrenstoffen geeignet.

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I

Anwendungsbereiche: Bestimmt für einfache Pflege- und Hygienebereiche.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:

1. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die PE-Kittel auf eventuelle Mängel oder Fehler, wie Löcher und Risse. Beschädigte PE-Kittel nicht verwenden.
2. PE-Kittel, die während des Gebrauchs reißen oder durchstochen werden, sind umgehend zu entsorgen. Verwenden Sie im Zweifelsfall einen neuen Kittel.
3. Wenden Sie die Innenseite der Kittel nicht nach außen.
4. Kittel von offenen Flammen fernhalten. Leicht entzündlich.

Bestandteile/Gefährliche Bestandteile: Warnhinweis: Die verwendeten Materialien sind nicht dafür bekannt allergische Reaktionen, sonstige Irritationen oder gesundheitliche Probleme hervorzurufen.

Pflegeanleitung:

Lagerung: Vor direktem Sonnenlicht schützen, kühl und trocken lagern. Werden die PE-Kittel gemäß den obigen Anleitungen ordnungsgemäß gelagert, werden ihre Leistungsfähigkeit und Eigenschaften nicht wesentlich gemindert. PE-Kittel, deren Leistung oder Eigenschaften durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden können, sind auf den Verpackungsmaterialien mit einem Haltbarkeitsdatum versehen.

Reinigung: PE-Kittel können weder gewaschen noch wiederverwendet werden. (Einmalgebrauch)

Sterilität: Die Produkte sind unsteril!

Entsorgung: Gebrauchte Kittel können mit infektiösen oder anderen gefährlichen Stoffen verschmutzt sein. Entsorgen Sie diese gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. Entsorgung in Deponien oder Müllverbrennungsanlagen nur unter kontrollierten Bedingungen.

Verpackungseinheit: VE = 10 Stück einzeln im Polybeutel
UK = 100 Stück im Karton (Inhalt 10 VE)